

Hordozható Oxigénkoncentrátor – Használati útmutató

Modell: OT-OX-3

Ez a gép olyan fizikai mechanizmussal rendelkezik, amely 28+/-2%-os koncentrációban gazdag oxigént állít elő és szolgáltat vákuumszivattyú és makromolekulák segítségével.

Figyelem! A termék nem helyettesíti a lélegeztetőkészüléket!

Biztonsági előírások:

- a készüléket gyermekek vagy fogyatékkal élők csakis felnőtt felügyelete mellett használhatják
- a készüléket jól szellőző helységben kell alkalmazni, azt letakarni tilos! A készülék oldalán található szellőzőnyílásokat hagyja szabadon.
- a szűrőket a használat gyakoriságától függően rendszeresen tisztítsa meg, de a tisztítás ideje soha ne haladja meg a 6 hónapot!
- sérült tápkábelrel a készüléket tilos használni! Amennyiben sérülés érte azt, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy forgalmazóval és gondoskodjon új kábel beszerzéséről.
- ügyeljen arra, hogy folyékony anyag ne kerüljön a készülékbe. Ha ez megtörténik, állítsa le a készüléket, és forduljon hozzáértő technikushoz a javítás érdekében.
- működés közben ne döntse meg a készüléket!
- az adapter és a tölthető akkumulátor a készülékhez készült, nem helyettesíthető más típusú alkatrészszel, mert az bizonytalan működést vagy a termelőegység károsodását eredményezi.
- működési környezeti hőmérséklet: 5 °C -40 °C, páratartalom: 90% relatív páratartalom alatt
- tárolási környezeti hőmérséklet: 0°C – 40 °C, páratartalom: 80% relatív páratartalom alatt

Csomag tartalma:

- 1 db készülék
- 1 db hordozható akkumulátor
- 1 szett oxigéncső maszkkal
- 2 db akkumulátor töltő
- 1 db hordtáska

Beüzemelés

- csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz
- kapcsolja be a bekapcsoló gombbal
- a „SET” gombbal állítsa be a kívánt üzemidőt: egyszeri megnyomással 20 percre, kétszeri megnyomással 40 percre, háromszori megnyomással 60 percre, míg ha négyszer nyomja meg

- 4 órán át működik a készülék. A beállított program hosszúságot, a számjegy melletti zöld jelzőfény világítása mutatja.
- a készülék működtethető a hordozható akkumulátorról is, így az akár gépjárműben (utasként) is használható. Ennek érdekében oxigénkoncentrátorát a hordozható akkumulátorhoz csatlakoztassa.

Specifikáció

Oxigén koncentráció:	28%±2%
Oxigén kibocsátás:	3 liter / perc
Feszültség:	AC100V-240V /DC12V-16.8V
Teljesítmény:	32W
A készülék mérete:	230 x 110 x 160 mm
A készülék súlya:	2 kg
Zajszint:	<48dB

A készülék tisztítása

Áramtalanítsa a készüléket, majd azt követően havonta egyszer egy puha, nedves ronggyal törölje át a készülék külsejét, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a ház repedéseibe. Ezt követően helyezze a készüléket egy jól szellőző helységbe és várjon 2 órát, hogy az megfelelően megszáradhasson.